

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA - MASECZKI OCHRONNE

Zgodna z wymogami Rozporządzenia (UE) 2023/988 - GPSR

WAŻNE! PRZECZYTAJ UWAŻNIE PRZED UŻYCIEM I ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ.

Niniejsza instrukcja zawiera kluczowe informacje dotyczące bezpiecznego użytkowania maseczek ochronnych. Niewłaściwe stosowanie może zmniejszyć skuteczność ochrony i stwarzać zagrożenie.

1. Przeznaczenie i Ograniczenia Stosowania

- Maseczki ochronne są przeznaczone do zakrywania ust i nosa w celu ograniczenia transmisji czynników zakaźnych drogą kropelkową i/lub ochrony dróg oddechowych przed niektórymi cząstkami, w zależności od typu i certyfikacji maseczki.
- **Zawsze sprawdzaj typ maseczki (np. medyczna, FFP2/FFP3, niemedyczna/wspólnotowa) i jej specyficzne właściwości ochronne podane przez producenta.** Niniejsza instrukcja ma charakter ogólny.
- Maseczka nie eliminuje całkowicie ryzyka zakażenia lub ekspozycji na zanieczyszczenia. Skuteczność zależy od prawidłowego dopasowania, ciągłego noszenia w sytuacji zagrożenia i właściwego użytkowania.
- Maseczki stanowią środek uzupełniający dla innych środków zapobiegawczych (np. higiena rąk, dystans społeczny).

2. Ostrzeżenia Dotyczące Bezpieczeństwa

- **Ryzyko zadławienia/uduszenia:** Nie stosować u niemowląt i małych dzieci (zwykle poniżej 3 roku życia) lub osób, które nie są w stanie samodzielnie zdjąć maseczki.
- Osoby z problemami z oddychaniem (np. astma, POChP) powinny skonsultować się z lekarzem przed użyciem maseczki, zwłaszcza maseczek o wyższym stopniu filtracji (np. FFP). W przypadku wystąpienia trudności z oddychaniem podczas noszenia, należy natychmiast zdjąć maseczkę i zasięgnąć porady medycznej.
- **Maseczki jednorazowe są przeznaczone wyłącznie do jednorazowego użytku. NIE UŻYWAĆ PONOWNIE.** Ponowne użycie grozi zanieczyszczeniem i utratą właściwości ochronnych.
- Wymień maseczkę na nową, jeśli stanie się wilgotna, zabrudzona lub uszkodzona.

- Nieprawidłowe dopasowanie maseczki znacznie zmniejsza jej skuteczność. Upewnij się, że maseczka szczelnie przylega do twarzy, zakrywając nos, usta i podbródek.
- Unikaj dotykania zewnętrznej powierzchni maseczki podczas noszenia. Jeśli do tego dojdzie, natychmiast umyj lub zdezynfekuj ręce.
- Nieprawidłowe zakładanie, zdejmowanie lub utylizacja maseczki może prowadzić do samozakażenia lub skażenia otoczenia.
- Maseczka nie chroni przed gazami, oparami ani bardzo drobnymi cząstkami, chyba że jest to wyraźnie wskazane w specyfikacji produktu (dotyczy specjalistycznych masek/filtrów).
- Zarost (np. broda) może uniemożliwić prawidłowe dopasowanie i uszczelnienie maseczki, szczególnie w przypadku masek typu FFP.
- Maseczka nie jest zabawką. Przechowywać poza zasięgiem dzieci, aby zapobiec niewłaściwemu użyciu.

3. Instrukcja Użytkowania

- **Przed użyciem:**
 - Sprawdź maseczkę pod kątem widocznych uszkodzeń (rozwarstwienia, dziury, zerwane gumki/trocзки). Nie używaj uszkodzonej maseczki.
 - Sprawdź datę ważności, jeśli jest podana na opakowaniu.
 - Dokładnie umyj ręce wodą z mydłem przez co najmniej 20 sekund lub użyj środka do dezynfekcji rąk na bazie alkoholu (min. 60%).
- **Zakładanie maseczki:**
 1. Wyjmij maseczkę z opakowania, trzymając ją za gumki lub troczki. Unikaj dotykania wewnętrznej i zewnętrznej powierzchni.
 2. Zidentyfikuj górną część maseczki (zwykle ze sztywnym paskiem na nos).
 3. Przybliż maseczkę do twarzy, zakrywając nos, usta i podbródek.
 4. Załóż gumki za uszy lub zawiąż troczki (górne na czubku głowy, dolne na karku).
 5. Dopasuj pasek nosowy (jeśli występuje), dociskając go palcami obu rąk do kształtu nosa, aby zapewnić szczelność.
 6. Upewnij się, że dolna krawędź maseczki znajduje się pod podbródkiem i że maseczka dobrze przylega do boków twarzy.

ProLine S.A., ul. Brzozowa 5, 55-095 Mirków, NIP: 8951898022, KRS: 0000282071, Regon: 020482041, BDO: 000437899. Wpisana przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej Wydział VI KRS pod nr: 0000282071. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 500000 zł i został on opłacony w całości.

7. **Test szczelności (szczególnie ważny dla masek FFP):** Wykonaj szybki wdech i wydech. Powietrze nie powinno uciekać bokami. Maseczka powinna lekko przylegać do twarzy podczas wdechu.

8. Po założeniu i dopasowaniu maseczki ponownie umyj lub zdezynfekuj ręce.

- **Podczas noszenia:**

- Unikaj dotykania maseczki. Jeśli musisz ją poprawić, zrób to trzymając za krawędzie lub gumki/troczyki, a następnie umyj/zdezynfekuj ręce.
- Nie opuszczaj maseczki na brodę ani nie zawieszaj jej na jednym uchu.
- Wymień maseczkę zgodnie z zaleceniami producenta lub gdy stanie się wilgotna/brudna.

- **Zdejmowanie maseczki:**

1. Dokładnie umyj lub zdezynfekuj ręce.
2. Zdejmij maseczkę, chwytając wyłącznie za gumki lub troczone. Nie dotykaj przedniej (zewnętrznej) części maseczki, gdyż może być zanieczyszczona.
3. Ostrożnie odciągnij maseczkę od twarzy.
4. Natychmiast wyrzuć maseczkę jednorazową do zamkniętego kosza na śmieci.
5. Ponownie dokładnie umyj lub zdezynfekuj ręce.

4. Przechowywanie

- Przechowuj nieużywane maseczki w czystym, suchym miejscu, w temperaturze pokojowej, z dala od bezpośredniego światła słonecznego, źródeł ciepła i substancji chemicznych.
- Najlepiej przechowywać maseczki w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu, aby chronić je przed zanieczyszczeniem.
- Nie przechowuj maseczki luzem w kieszeni, torebce itp., gdzie może ulec zabrudzeniu lub uszkodzeniu.

5. Utylizacja

- Zużyte maseczki jednorazowe należy traktować jako potencjalnie zakaźne odpady.
- Wyrzucaj maseczki natychmiast po zdjęciu do zamykanego pojemnika na odpady.

- Nie wyrzucaj maseczek do środowiska (np. na ulicę, do lasu).
- Postępuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji odpadów.

6. Informacje Dodatkowe

- Niniejsza instrukcja ma charakter ogólny. Zawsze zapoznaj się ze szczegółową dokumentacją dostarczoną przez producenta dla konkretnego typu maseczki, w tym z informacjami o poziomie ochrony (np. EN 14683 dla masek medycznych, EN 149 dla masek FFP) i certyfikacji.
- Używanie maseczki nie zwalnia z obowiązku przestrzegania innych zaleceń dotyczących higieny i bezpieczeństwa publicznego.

Pamiętaj: Twoje bezpieczeństwo zależy od prawidłowego stosowania produktu!